


КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

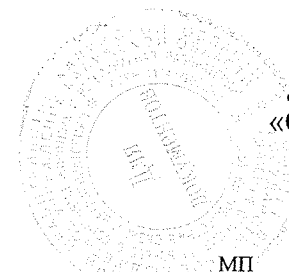

УТВЕРЖДАЮ
Директор, руководитель ИЛ ГБУ КО
«Областные СББЖ и ветлаборатория»

М.Н. Черняева
"23" июня 2023 г.

МП

ОЦЕНКА ПРОБ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Условия хранения и транспортирования
<i>Вирусологический отдел</i>						
1	Болезнь Ньюкасла	Серологический (РТГА)	Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С не более 3-х суток; не ниже -20°С длительно
			Кровь нестабилизированная	2-5 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	+2...+8 °С не более 3-х суток; замораживание не допускается
2	ИНАН	Серологический (РДП)	Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С не более 3-х суток; не ниже -20°С длительно
			Кровь нестабилизированная (без антикоагулянта или с фактором свертывания)	5-6 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	+2...+8 °С не более 3-х суток; замораживание не допускается
3	Лейкоз	Серологический (РИД)	Сыворотка крови/ кровь нестабилизированная	2-5 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	+2...+8 °С не более 3-х суток; -18...-20 °С длительно
		Гематологический	Кровь стабилизированная	Не менее 5 мл	Пробирка пластиковая с антикоагулянтом (фиолетовая крышка) либо стеклянная с антикоагулянтом	+2...+4 °С в течение 36 часов с момента взятия

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Условия хранения и транспортирования
<i>Вирусологический отдел</i>						
3	Лейкоз	ПЦР	Кровь стабилизированная с антикоагулянтом (ЭДТА или цитрат натрия)	Не менее 5 мл	Пробирка пластиковая с антикоагулянтом (фиолетовая крышка) либо стеклянная с антикоагулянтом	+2...+8 °С не более 1 суток; замораживание не допускается
4	Орнитоз	ПЦР	Органы и ткани	Трупы мелких птиц целиком, паренхиматозные органы	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс/сейф-пакет)	+2...+8 °С не более 1 суток; -18...-20 °С не более 1 недели
			Помёт	5-10г	Герметичная водонепроницаемая упаковка	+2...+8 °С не более 1 суток; -18...-20 °С не более 1 недели
5	Грипп птиц	Серологический (РТГА, ИФА)	Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+4 °С не более 4-х суток; не выше -20 °С в течение 50-60 суток
			Кровь нестабилизированная	2-5 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	2...+8 °С не более 3-х суток, замораживание не допускается
		ПЦР	Органы и ткани	Трупы мелких птиц целиком, паренхиматозные органы	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс/сейф-пакет)	+2...+8 °С не более 1 суток, не выше -20 °С в течение месяца, не выше -68 °С длительно
			Кровь	Не менее 2-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	2...+8 °С в течение 12 часов с момента взятия, замораживание не допускается
			Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С не более 1 суток, не выше -20 °С в течение месяца, не выше -68 °С длительно

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Условия хранения и транспортирования
<i>Вирусологический отдел</i>						
5	Грипп птиц	ПЦР	Помёт	5-10г	Герметичная водонепроницаемая упаковка	+2...+8 °С не более 1 суток, не выше -20 °С в течение месяца, не выше -68 °С длительно
			Яйцо	10 штук	Герметичная водонепроницаемая упаковка	+2...+8 °С не более 1 суток, не выше -20 °С в течение месяца, не выше -68 °С длительно
			Корма	1 кг	Герметичная водонепроницаемая упаковка	+2...+8 °С не более 1 суток, не выше -20 °С в течение месяца, не выше -68 °С длительно
			Пищевые продукты	Единица упаковки каждого наименования	Заводская упаковка/пластиковый пакет	+2...+8 °С не более 1 суток, не выше -20 °С в течение месяца, не выше -68 °С длительно
6	АЧС	ПЦР	Пищевые продукты	Единица упаковки каждого наименования	Заводская упаковка/пластиковый пакет	+2...+8 °С не более 12 часов
			Ткани	Кусочки размером 5х3х2 см, лимфоузлы целиком	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс/ сейф-пакет)	+2...+8 °С не более 12 часов
			Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С не более 12 часов
			Кровь (с антикоагулянтом и без антикоагулянта)	Не менее 5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С не более 12 часов с момента взятия,
		ИФА (антитела)	Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+4 °С не более 12 часов,
		ИФА (антиген)	Сыворотка крови/цельная кровь	2-5 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	+4 °С не более 3-х суток; -20 °С до 50-60 суток; допускается однократное замораживание- оттаивание материала

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Условия хранения и транспортирования
Вирусологический отдел						
6	АЧС	ИФА (антиген)	Кусочки внутренних органов (селезенка, лимфатические узлы)	5-10 г	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс/сейф-пакет)	+4 °С не более 3-х суток; -20 °С до 50-60 суток; допускается однократное замораживание-оттаивание материала
7	Бешенство	МФА	Труп, голова, головной мозг	головной мозг (целиком)	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс/сейф-пакет)	+2...+8 °С в течение 12 часов, замораживание не допускается
		Биопроба				
8	Лептоспироз	ПЦР	Цельная кровь	2-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С в течение 12 часов с момента взятия, замораживание не допускается
			Ткани и органы	Фрагменты размером 5х3х2 см, лимфоузлы целиком	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс/сейф-пакет)	+2...+8 °С не более 1 суток, не выше -16 °С в течение недели, не выше -68 °С длительно
			Моча	15-25 мл	Стерильные контейнеры	+2...+8 °С не более 1 суток, не выше -16 °С в течение недели, не выше -68 °С длительно
			Продукты питания	Единица упаковки каждого наименования	Стерильные контейнеры	+2...+8 °С не более 1 суток, не выше -16 °С в течение недели, не выше -68 °С длительно
9	Бруцеллёз	ПЦР	Цельная кровь	5-10 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С в течение 24 часов с момента взятия, замораживание не допускается
			Ткани и органы	Фрагменты размером 1х1х1 см, лимфоузлы целиком	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс/сейф-пакет)	+2...+8 °С в течение 24 часов с момента взятия

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Условия хранения и транспортирования
Вирусологический отдел						
9	Бруцеллез	ПЦР	Молоко	10-20 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С в течение 24 часов с момента взятия, замораживание не допускается
		ИФА	Сыворотка крови	1-2 мл	Стерильная пробирка	+2...+8 °С в течение 72 ч., не выше -20 °С в течение 60 суток допускается однократное замораживание – оттаивание образцов
			Молоко, молозиво, секрет вымени	Не менее 5 мл	Стерильный контейнер	+2...+8 °С в течение суток, замораживание не допускается
10	Блютанг	ИФА	Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С не более 24 ч со дня отбора, замораживание при -20 °С в течение 1 месяца, оттаивание не допускается
		ПЦР	Кровь, сыворотка крови	1-2 мл	Стерильная пробирка	+2...+8 °С не более 48 ч со дня отбора, замораживание при -20 °С в течение 1 месяца, оттаивание не допускается
			Органы и ткани (миндалины, селезенка, легкие, печень, лимфоузлы)	Фрагменты размером 2х2х2 см, лимфоузлы целиком	Стерильный контейнер	
Серологический отдел						
11	Бруцеллёз	Серологический	Сыворотка крови	2-5 мл	Стерильная пробирка	Свежая сыворотка +2...+8 °С не более 48 часов, замораживание не допускается
			Кровь нестабилизированная	5-7 мл	Стерильная пробирка (одноразовая, красная)	+2...+8 °С не более 48 часов, замораживание не допускается
			Молоко	100-120 мл	Стерильная пробирка	+2...+8 °С в течение 24 часов с момента взятия, замораживание не допускается
12	Листерия	Серологический	Сыворотка крови	2-5 мл	Стерильная пробирка	+4...+8 °С не более 24 часов, однократное замораживание – длительно
13	Инфекционный эпидидимит	Серологический	Сыворотка крови	3-5 мл	Стерильная пробирка	Свежая сыворотка +4...+8 °С не более 48 часов, замораживание не допускается


№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Условия хранения и транспортирования
Серологический отдел						
14	Паратуберкулёз	Серологический	Сыворотка крови	3-5 мл	Стерильная пробирка	Свежая сыворотка +4...+8 °С не более 5 суток; консервирование борной кислотой - 10 суток
15	Сап	Серологический	Сыворотка крови	3-5 мл	Стерильная пробирка	Свежая сыворотка +4...+8 °С не более 5 суток; консервирование борной кислотой - 10 суток, однократное замораживание – длительно
16	Трипаносомоз	Серологический	Сыворотка крови	1-2 мл	Стерильная пробирка	Нативная сыворотка крови – 48 ч, консервированная 5 % фенолом, сухой борной кислотой (2-4 % к объёму) - 30 суток
17	Хламидиоз	Серологический	Сыворотка крови	3-5 мл	Стерильная пробирка	Только свежая сыворотка - +4...+8 °С не более 3-х суток, допускается однократное замораживание – длительно (-20 °С), консервирование борной кислотой, мертиолятом
18	Лептоспироз	Серологический	Сыворотка крови	2-5 мл	Стерильная пробирка	Нативная сыворотка - +4...+8 °С не более 6 суток; консервированная сыворотка 5 % фенолом, сухой борной кислотой (2-4 % к объёму) – 30 суток; однократное замораживание – длительно; высушенные на фильтровальной бумаге 5 x 5 см – 30 суток
		Микроскопический	Моча	10-20 мл	Пластиковый контейнер для мочи	Время отбора проб обязательно! Исследование проводится при 25-30 °С в течение 4...5 ч, при 20-25 °С – 6...8 ч, при 16-20 °С – 10...12 ч от времени взятия пробы
Бактериологический отдел						
19	Диктиокаулёз	Гельминтокопрологический	Фекалии	5 г (овцы); 10 г (КРС, лошади, свиньи)	Сейф-пакет, пластиковый контейнер	+2...+8 °С не более 4 ч в теплое время года, в остальное время года - не более 1 суток
20	Гельминтозы	Гельминтокопрологический	Фекалии	5 г (овцы); 10 г (КРС, лошади, свиньи)	Сейф-пакет, пластиковый контейнер	+2...+8 °С не более 1 суток

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Условия хранения и транспортирования
Бактериологический отдел						
21	Криптоспоридиоз	Микроскопический	Фекалии	5 г (овцы); 10 г (КРС, лошади, свиньи)	Сейф-пакет, пластиковый контейнер	+2...+8 °С не более 1 суток
22	Демодекоз	Микроскопический	Кожный соскоб	3-5 корочек с кожного покрова	Пластиковый контейнер	В день отбора необходимо доставить
23	Протозоозы и арахноэнтомозы	Микроскопический	Подмор пчёл	10-20% от имеющихся пчелосемей (200 г)	Мешочек из бумаги, пластиковый контейнер	Не более 1 суток с момента отбора материала
24	Сибирская язва	Серологический	Мясо и субпродукты всех видов убойного скота	1-2 г	Сейф-пакет + влагонепроницаемая тара	Не выше +4°С не более 1 суток
			Органы павших животных	Не менее 1,0 г	Бикс + стеклянная или пластиковая посуда	+2...+8 °С не более 1 суток
25	Пироплазмидозы	Микроскопический	Мазки крови	2 мазка от одного животного	Стекло	Доставка в день отбора
			Кровь	1 мл	Пробирка с трилоном Б	
26	Трихомоноз	Культуральный	Патологический материал (паренхиматозные органы, сердце, головной мозг и лимфатические узлы)	Кусочки органов или органы целиком	Контейнер	В охлажденном виде не позднее 4 ч после отбора
			Смывы/слизь/соскобы препуциальные и вагинальные; сперма	3-5 мл	Стерильные пробирки и флаконы	

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Условия хранения и транспортирования
<i>Бактериологический отдел</i>						
27	Американский и европейский гнильцы	Микроскопический и бактериологический	Абортированный плод целиком или сычуг с содержимым; паренхиматозные органы плода и часть плаценты	Абортированный плод целиком, органы плода	Пластиковый контейнер	Допускается замораживать, не позднее 12 ч после отбора
			Соты с больными и погибшими личинками	Образцы сотов 10*15 см	Фанерный или деревянный ящик; обертывание бумагой запрещено	Не более 1 суток с момента отбора материала

Разработано:

Заместитель директора – технический руководитель ИЛ, главный метролог

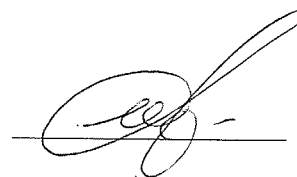

/ Т.В. Фурсова /

«22» 06 2023 г.